


SolüKAT™

Medizinisches „All-in-One“-Klebeplaster zum Schutz des zentralen Venenkatheters (CVC).

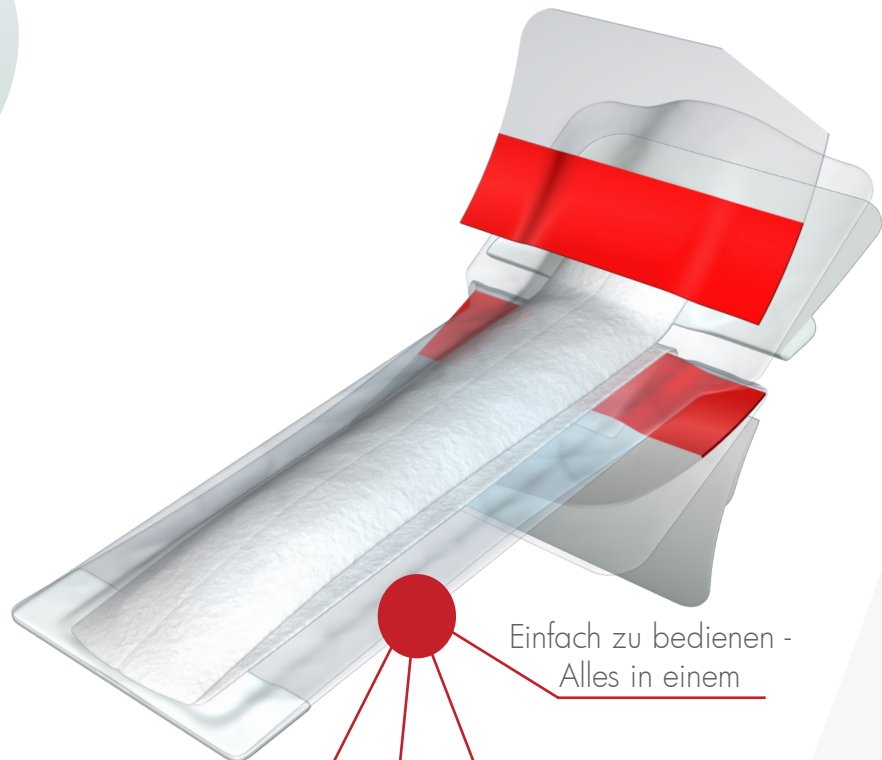

Einfach zu bedienen -
Alles in einem

Sehr bequem - weich
und diskret

Reduziert das Risiko einer
Infektion an der Austrittsstelle

Wasserdicht, ermöglicht
das Duschen



Solukat™ in der Realität

Entdecken Sie jetzt das
Solukat™ Produkt im Video

Solukat™ ist ein benutzerfreundliches, steriles Produkt zum Einmalgebrauch, welches entwickelt wurde, um einen zentralen Venenkatheter unter Einhaltung der strengsten Hygieneprotokolle vollständig zu schützen.


Solukat™ besteht aus Polyurethan, ein Material mit weicher Haptik und einzigartigen Eigenschaften, da es gleichzeitig eine Bakterienbarriere, wasserdicht (gemäß der Prüfung in Anhang J der Norm NF EN 13726:2023) und hochgradig gasdurchlässig (atmungsaktiv) ist.

Am Ende der Dialysebehandlung angelegt, kann Solukat™ bis zu 3 Tage auf der Haut verbleiben und bietet ausreichenden Schutz von den Austrittsstellen bis zu den Konnektoren bis zur nächsten Sitzung.


Die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten ist unsere Priorität, deshalb ist Solukat™ ein perfekt abgedichtetes einteiliges Produkt, mit dem der Patient wieder gerne duschen kann. Um das Risiko von Reizungen zu begrenzen, ist der Solukat-Kleber biokompatibel, und wir haben auch die Kontaktfläche mit der Haut auf ein Minimum reduziert.

Wir empfehlen Patienten mit empfindlicherer Haut die Verwendung von Solukat Si™, sofern ihre Haut nicht von Natur aus oder nach sportlichen Aktivitäten stark schwitzt.


ANLEITUNG

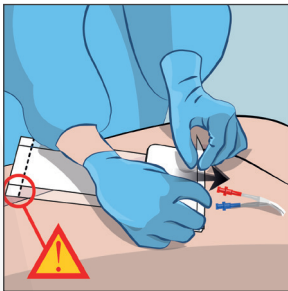


Schieben Sie die Katheterenden bis zu den Einführungspunkten in den Beutel, und legen Sie den Klebestreifen auf die Hautseite.

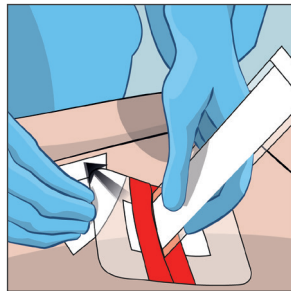

Entfernen Sie das Schutzpapier und kleben Sie das Oberteil auf. Entfernen Sie das Schutzpapier vom Unterteil.

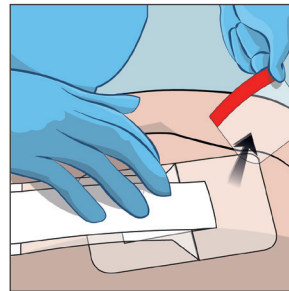

Entfernen Sie die roten Markierungsstreifen.

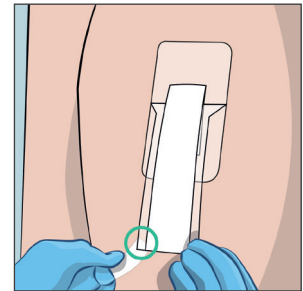

Entfernen Sie das Schutzpapier vom Klebestreifen. Solukat™ ist jetzt einsatzbereit

VERTRIEB

Difom Med. a. Orth.C.C.

B.A. Andreas Roth

Verkaufsleiter

Jakobstr. 3
92348 Sindlbach

e-mail: info@difom.life
Mobil: +4915150736811